





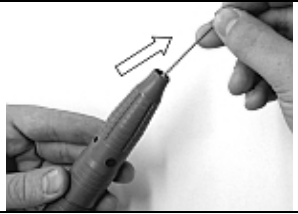
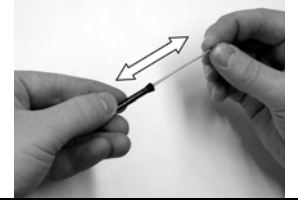






WARTUNG DER SPANNZANGE

Handstücke: H310 / H310-1

1	Stopfen entfernen: Entfernen Sie den kleineren Stopfen MU 1444 mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers aus der Handstückhülse.	
2	Werkzeug entfernen: Öffnen Sie die Spannzange durch Drehen der Handstückgriffhülse in Pfeilrichtung bei gleichzeitigem Festhalten der Motorgriffhülse bis zum Einrasten. Entnehmen Sie das Werkzeug.  Öffnen Sie das Handstück niemals während des Betriebes.	
3	Spannzange lösen: Arretieren Sie die Motorachse mit einem Fräseschaft, der in die Öffnung des entfernten Stopfens MU 1444 gesteckt wird. Dann schrauben Sie die Spannzange mit dem Schlüssel MU 0222 in Pfeilrichtung heraus. Schlüssel bis zum Anschlag einführen.	
4	Spannzange entfernen: Entnehmen Sie die Spannzange aus der Welle und überprüfen, reinigen oder wechseln Sie die Spannzange. Beschädigte oder verschmutzte Spannzangen verringern die Spannkraft und die Rundlaufgenauigkeit. Unfallgefahr!  Es besteht Unfallgefahr, wenn mit der beschädigten Spannzange weitergearbeitet wird.	
5	Welle reinigen: Befördern Sie den Schmutz mit der Bürste MU 0492 durch Linksdrehung aus dem Handstück hinaus.	
6	Spannzange reinigen: Reinigen Sie die Spannzange MU 0221 (ø 2,35 mm) mit der Bürste MU 0492. ø 3,00 mm Spannzangen haben die Bestellnummer MU 0221B.	
7	Spannzange einsetzen: Führen Sie die Spannzange ein.	

WARTUNG DER SPANNZANGE

Handstücke: H310 / H310-1

8	<p>Spannzange festziehen:</p> <p>Arretieren Sie die Motorwelle mit dem Fräserschaft. Ziehen Sie die Spannzange mit dem Schlüssel MU 0222 in Pfeilrichtung fest.</p>	
9	<p>Werkzeug spannen:</p> <p>Setzen Sie das Werkzeug ein und schließen Sie die Spannzange durch Drehen der Handstückgriffhülse in Pfeilrichtung. Halten Sie gleichzeitig die Motorgriffhülse fest. Achten Sie auf das Einrastgeräusch.</p> <p> Verwenden Sie nur einwandfreie Werkzeuge!</p>	
10	<p>Stopfen einsetzen:</p> <p>Setzen Sie den Stopfen MU 1444 wieder mit einem Daumendruck ein. Das Handstück ist wieder betriebsbereit.</p>	