


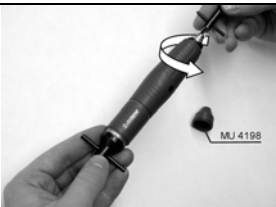

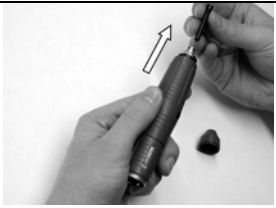

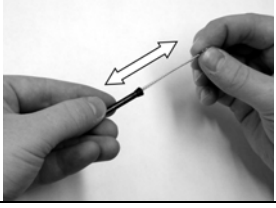





WARTUNG DER SPANNZANGE

Handstücke H350 / H550 / HK 35 / HK50

1	Werkzeug entfernen: Öffnen Sie die Spannzange durch Drehen der Handstückgriffhülse in Pfeilrichtung bei gleichzeitigem Festhalten der Motorgriffhülse bis zum Einrasten. Entnehmen Sie das Werkzeug.  Öffnen Sie das Handstück niemals während des Betriebes!	
2	Motorabschlusskappe entfernen: Motorabschlusskappe MU 4115 in Pfeilrichtung abschrauben. Halten Sie die Motorgriffhülse fest. Schrauben Sie die Motorabschlusskappe MU 4115 in Pfeilrichtung los und ziehen den Stecker ab.	
3	Spannzange lösen: Schrauben Sie von Hand die Kappe MU 4198 vom Handstück ab. Halten Sie die Welle am Motor mit dem Steckschlüssel MU 4136 fest und schrauben Sie die Spannzange mit dem Spannzangenschlüssel MU 0222 heraus (Pfeilrichtung).	
4	Spannzange entfernen: Entnehmen Sie die Spannzange aus der Welle und überprüfen, reinigen oder wechseln Sie die Spannzange. Beschädigte oder verschmutzte Spannzangen verringern die Spannkraft und die Rundlaufgenauigkeit.  Es besteht Unfallgefahr, wenn mit der beschädigten Spannzange weitergearbeitet wird.	
5	Welle reinigen: Befördern Sie den Schmutz mit der Bürste MU 0492 durch Linksdrehung aus dem Handstück hinaus.	
6	Spannzange reinigen: Reinigen Sie die Spannzange MU 0221 (ø 2,35 mm) mit der Bürste MU 0492. ø 3,00 mm Spannzangen haben die Bestellnummer MU 0221B.	
7	Spannzange einsetzen: Führen Sie die Spannzange ein. Halten Sie die Welle am Motor mit dem Steckschlüssel MU 4136 fest und schrauben Sie die Spannzange mit dem Spannzangenschlüssel MU 0222 in Pfeilrichtung ein. Schrauben Sie die Kappe MU 4198 von der Hand wieder auf.	

WARTUNG DER SPANNZANGE

Handstücke H350 / H550 / HK 35 / HK50

8	<p>Motorabschlusskappe montieren:</p> <p>Stecken Sie den Stecker vorsichtig auf die Kontakte. Schrauben Sie die Motorabschlusskappe MU 4164 in Pfeilrichtung an und ziehen es mit der Hand sehr fest.</p>	
9	<p>Werkzeug spannen:</p> <p>Setzen Sie das Werkzeug ein und schließen Sie die Spannzange durch Drehen der Handstückgriffhülse in Pfeilrichtung. Halten Sie gleichzeitig die Motorgriffhülse fest. Achten Sie auf das Einrastgeräusch. Das Handstück ist wieder betriebsbereit.</p> <p> Verwenden Sie nur einwandfreie Werkzeuge!</p>	